



INAMA

LAGERUNGSHILFEN & PFLEGETEXTILIEN





Zur Druckentlastung, Frei- und Mehrfachlagerung

Der Krankenpflegebereich fordert für unterschiedlichste Anforderungen universell einsetzbare Lagerungskissen in verschiedensten Größen und Ausführungen. Diese werden einzeln oder in Kombination individuell eingesetzt. Trotz der funktionalen Priorität soll der Patient dabei nicht auf gewohnten Komfort verzichten. Bequeme Lagerungsmöglichkeiten und moderne Hygieneanforderungen werden durch den Einsatz hochwertiger Materialien und sorgfältiger Verarbeitung gewährleistet.

Typische Anwendungen der Lagerungskissen werden in drei Bereichen eingesetzt:

- Lagerung von Kopf und Extremitäten
- Druckentlastung durch das Fünfkissensystem. Kissenbett, Seitenlagerung und Umlagerung.
- Speziallagerung mittels Weichlagerung und Freilagerung von Fersen und Steißbein: Bei Patienten mit Kontrakturen bzw. Rehabilitative bei Apoplexpatienten.

Bestell-Nr.	LG 01	LG 03	LG 04
Größe ca. cm	40/40	50/80	60/80

Mit Polyurethan Stäbchen gefüllt

Jersey Bezüge passend zur Größe

Bestell-Nr.	BZ 01	BZ 03	BZ04
-------------	-------	-------	------



Rechteckkissen

Die praktische Ergänzung zum Lagerungskissen in herkömmlicher Form. Diese Kissenform besitzt eine erhöhte Stabilität durch seitliche Abnäher.

Bestell-Nr.	LG 21
Größe a. cm	55 x 20 x 8h

Mit Polyurethan Stäbchen gefüllt

Jersey Bezüge passend zur Größe

Bestell-Nr.	BZ 21
-------------	-------



Lagerungsrollen

Einsatzmöglichkeit durch individuelle Lagerung bei verschiedenen Krankheitsbildern. Diese Rolle passt sich ergonomisch jeder Körperform an. Prophylaktisch sinnvolle Anwendung bei Dekubitus, Kontraktionen und Pneumonie.

Anwendungsmöglichkeiten:

- Inneres Kissen mit wasserdichtem atmungsaktivem Bezug mit Hohlfaser Füllung. Außen abnehmbarer Baumwollbezug waschbar.
- Stabile Seitenlage
- Hohllagerung
- Hochlagerung der Extremitäten
- 30° Lagerung
- Kurzzeitiges Fixieren von Armen und Beinen

Durch den Einsatz nur eines Kissens bleibt die Bewegungsfreiheit des Patienten gesichert.

Bestell-Nr.	LG 80	LG 81
Größe ca. cm	220 x 2 Ø cm	260 x 11 Ø cm

Mit Baumwollbezüge Komforel - Polyester-Hohlfasern

Bezüge passend zur Größe

Bestell-Nr.	BZ 80	BZ 81
-------------	-------	-------



Lagerungsrolle

Zur Weichlagerung von Nacken, Bein und Rücken. Die strapazierfähige und ausgesprochen universelle Lageungshilfe. Durch spürbare Entlastung werden Verspannungen der Halswirbelsäule, der Beine und im Hüft- und Rückenbereich abgebaut.

Bestell-Nr.	LG 34
Größe ca. cm	60/20

Mit Polyurethan Stäbchen gefüllt

Jersey Bezüge passend zur Größe

Bestell-Nr.	BZ 34
-------------	-------





Beinkissen mit Kammern

Vier Kammern, die man unter- bzw. auch übereinander schichten kann, ermöglichen die Ausbildung der jeweils notwendigen Ebene, um die Beine in dieser Position stabil und sicher zu fixieren.

Bestell-Nr. LG 38

Größe ca. cm 65/75



Mit Polyurethan Stäbchen gefüllt

Jersey Bezüge passend zur Größe

Bestell-Nr. BZ 38



Fuß- und Beinhöckerkissen

Die sanfte Korrektur, um ein Gegeneinanderreiben von Fußknöcheln und Knien zu vermeiden. Die Kissen gewährleisten gleichzeitig die Fersenfreilagerung.

Bestell-Nr. LG 37

Größe ca. cm 40/80



Mit Polyurethan Stäbchen gefüllt



Ellbogenschutz

Die Freilagerung des Ellbogenknochens wird durch die eingearbeitete Öffnung gewährleistet. Die weiche Befestigungsklappe wird mit einem Klettverschluss geschlossen.

Bestell-Nr. LG 65 / LG 30

Größe ca. cm 15 x 28 x 6



Mit Polyurethan Stäbchen gefüllt

Handrolle

Für regelmäßige Bewegungsübungen und zur Verhütung von Fehlstellungen. Ebenfalls anwendbar zur Vermeidung von Kontrakturen und bei halbseitiger Lähmung zur Wiederherstellung der Mobilität nach Apoplexie.

Bestell-Nr. LG 68

Größe ca. cm D=15/6



Mit Polyurethan Stäbchen gefüllt



Ohrmuschelkissen

Die Freilagerung der Ohrmuschel wird durch die eingearbeitete Öffnung gewährleistet.

Bestell-Nr. LG 30 / LG 65

Größe ca. cm 15 x 28 x 6



Mit Polyurethan Stäbchen gefüllt





Rückenstützkissen mit Fahne zur Seitenlagerung

Die unersetzliche Hilfe zum Fixieren der Seitenlage und zur Kopfunterstützung bei Patienten, die das Bewusstsein bzw. die Kontrolle über die Körperbewegungen verloren haben. Eine Hälfte gefüllt, andere Hälfte als Fahne unter den Körper zur Stabilisierung.

Bestell-Nr.	LG 70
Größe ca. cm	80/80 gefüllt 40/80



Mit Polyurethan Stäbchen gefüllt

Jersey Bezüge passend zur Größe

Bestell-Nr.	BZ 70
-------------	-------



HWS- Cervikalring

Zur Ruhigstellung von Kopf und Nacken und zur Verlagerung des Körpergewichtes im Bandscheibenbereich.

Bestell-Nr.	LG 25	LG 26
Für Halsumfang bis ca. 38 bzw. 45		

D = 38 D = 45



Mit Polyurethan Stäbchen gefüllt

Jersey Bezüge passend zur Größe

Bestell-Nr.	BZ 25	BZ 26
-------------	-------	-------

"A", "T" und "V" Lagerungskissen

Diese Lagerungskissen sind multifunktional einzusetzen. Entsprechend der Ausführung der Kissen, liegt der Anwendungsschwerpunkt bei den atemunterstützenden Lagerungen. Sie sind aber ebenso gut zur Dekubitusprophylaxe bzw. Therapie anwendbar.

Atemunterstützende A-, T- oder V-Lagerung

Je nach Lage der Kissen wird eine Dehnung der verschiedenen Segmente der Lunge erreicht. Es entsteht durch diese Erweiterung eine bessere Belüftung und somit ein effektiverer Gasaustausch. Gleichzeitig haben diese Lagerungsmöglichkeiten auch eine entspannende Wirkung. Dies ist für Patienten mit pulmonalen Problemen eine zusätzliche Unterstützung der Atmung. Die beste Wirkung dieser Lagerungsmaßnahmen werden bei flachem Kopfteil des Bettes erreicht.

Dekubitus-therapie oder -prophylaxe

Hierbei kann eine Hohllagerung erreicht werden, die je nach Lage der Kissen z.B. die Dornfortsätze der Wirbelsäule oder die Schulterblattspitzen entlastet. Diese Lagerung ist im Sitzen gleichermaßen wirkungsvoll wie im Liegen

Bestell-Nr.	LG 60
Größe ca. cm	65/24



Mit Polyurethan Stäbchen gefüllt

Jersey Bezüge passend zur Größe

Bestell-Nr.	BZ 60
-------------	-------



Polyurethan-Stäbchen





Seitengitterschutz 180

Schutzkissen mit Universalform aus formbeständigem Schaumstoff, passend zu jedem Pflegebett. Bezug aus wasserdichtem und luftdurchlässigem Stoff. Abziehbar mittels länssseitigem Reißverschluss und waschbar bis 60°. Abwaschbar mit Alkohol und Desinfektionsmittel.

Für eine Bettseite.

Bestell-Nr: Art.	EU 180
Maße:	180 x 30 x 35



Seitengitterschutz 185

Schutzpolster aus hochwertigem Kunstleder mit Polsterung. Anbringung über einen längs verlaufenden Klettverschluss. Antibakteriell, flammhemmend und abwaschbar. Abwaschbar mit Alkohol und Desinfektionsmittel.

Für eine Bettseite.

Bestell-Nr:	EU 185
	1 Stück 180 x 30 x 35 cm

Seitengitterschutz 187 & 188

2 Schutzpolster aus hochwertigem, gepolstertem Kunstleder. Geeignet für geteilte Bettgitter. Befestigung über einen längs verlaufenden Klettverschluss. Antibakteriell, flammhemmend und abwaschbar. Abwaschbar mit Alkohol und Desinfektionsmittel.

Für eine Bettseite

Bestell-Nr: EU 187	EU 188
2 Stück 80 x 30 cm	2 Stück 96 x 30 cm

Matratzenschutz der neuen Generation - TECHMAFLEX FR

Entdecken Sie den einzigartigen Matratzenbezug mit Schweißnaht-Technologie: absolut wasserundurchlässig, hygienisch und sicher. Alle Verbindungen – sogar am Reißverschluss – sind geschweißt und dadurch komplett dicht. Keine Nähte, keine Schwachstellen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Wasserdichter Spezialreißverschluss
- Hohe Elastizität – optimal für Pflege- und Antidekubitus-Matratzen, unterstützt die Druckentlastung und Prophylaxe
- Wasserundurchlässig & dampfdurchlässig – schützt die Matratze, sorgt gleichzeitig für ein angenehmes Schlafklima
- Schwer entflammbar – für maximale Sicherheit in Pflege, Klinik und Hotel
- Antiallergisch, schadstofffrei, antibakteriell & schimmelfrei – für höchste Hygienestandards
- Langlebig & pflegeleicht – waschbar bis 95 °C, dampfsterilisierbar bis 135 °C, abwischbar mit Alkohol & Desinfektionsmitteln
- Reiß- und urinfest – auch im anspruchsvollen Pflegealltag zuverlässig


Mit dem TECHMAFLEX FR Bezug erhalten Sie kompromisslosen Rundum-Schutz für Ihre Matratze – hygienisch, sicher und komfortabel zugleich.



Pflegebody ohne Arm mit Beinreißverschluss

Art.Nr.: 4698-001

- Unterhemd und Fixierhose in einem Produkt schützt vor Auskühlen
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit
- teilbarer Reißverschluss am Beinschritt
- Farben: grau weiß
- Größen S M L XL XXL

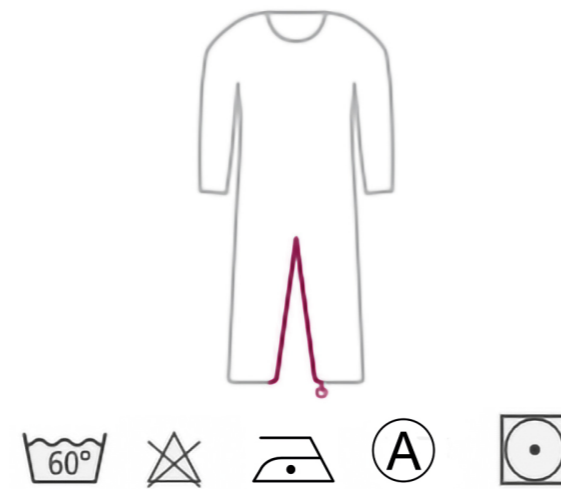


Um Pflegezeit für dementiell veränderte Patienten mit Inkontinenzproblematik zu verkürzen und den Pflegeaufwand zu verringern, bietet Suprima praktische Pflegebodys an. Der Body für Frauen und Männer vereint Fixierhose und Unterhemd in einem Produkt. Der Pflegebody fixiert das Inkontinenzmaterial optimal am Körper, verhindert nahezu den Zugriff auf das Inkontinenzmaterial und schützt vor dem Auskühlen. Ein teilbarer Beinreißverschluss sorgt dafür, dass Inkontinenzprodukte ohne das vollständige Entkleiden des Patienten gewechselt werden können. Das weiche und hautfreundliche Material sorgt für höchsten Tragekomfort.

CareFunction Pflegeoverall Slim, kurz

Art.Nr.: 4702-069

- teilbarer Reißverschluss am Beinschritt
- Sicherung am Beinreißverschluss erschwert die Selbstentkleidung und den Zugriff auf Windel-/ Inkontinenzmaterial
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit
- diagonal verlaufender Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor figurhafter Schnitt
- Farben: marine erika petrol
- Größen S M L XL

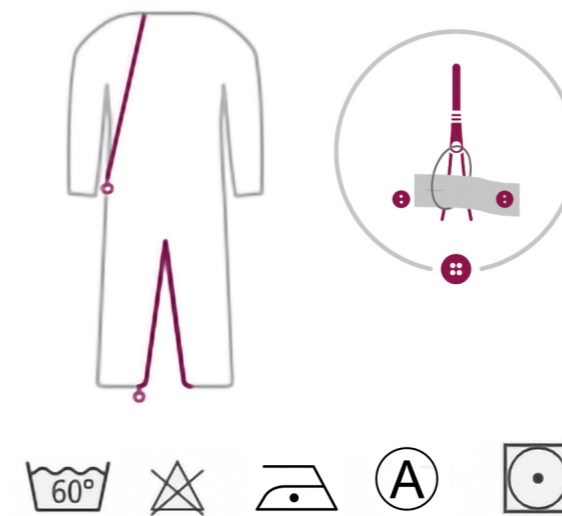


Der teilbare Beinreißverschluss im Schritt ermöglicht Austausch bzw. Kontrolle von Inkontinenzprodukten, Kompressionsstrümpfen oder Verbänden ohne vollständiges Entkleiden des Patienten. Eine Sicherung am Reißverschluss erschwert die Selbstentkleidung und den Zugriff auf Windel- und Inkontinenzmaterial.

Pflegebody kurzer Arm mit Beinreißverschluss

Art.Nr.: 4697-001

- Unterhemd und Fixierhose in einem Produkt
- schützt vor Auskühlen
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit
- teilbarer Reißverschluss am Beinschritt
- Farben: grau weiß
- Größen S M L XL XXL

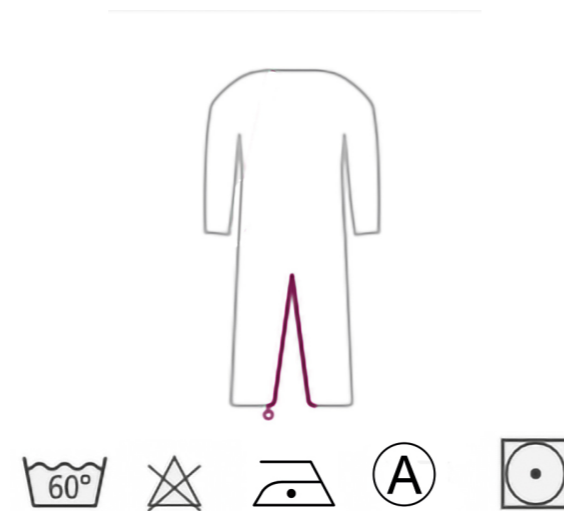


Unsere Pflegeoveralls eignen sich besonders für demenziell erkrankte Personen, die an Inkontinenzerscheinungen leiden. Gerade Demenzpatienten haben einen hohen Drang sich selbst zu entkleiden. Bleibt dies unbemerkt, kann das ernste Folgen haben. Der Pflegebedürftige selbst merkt nicht, dass es notwendig ist, sich wieder anzukleiden oder kann es nicht mehr alleine durchführen. Das kann zum Auskühlen des Körpers und zu anschließenden Folgeerscheinungen führen. Hinzu kommt, dass demenziell veränderte Patienten mit Inkontinenz ihr Inkontinenz-Material herausziehen und mit Stuhl schmieren. Neben der Verbreitung von Keimen und Krankheitserregern stellt dies für den Pflegenden eine starke psychische und physische Belastung dar. Mit einem Pflegeoverall können Pflegeabläufe enorm vereinfacht werden und ein Stück Lebensqualität zurück gewonnen werden! Unser suprema



CareFunction Pflegeoverall Slim, lang

Art.Nr.: 4701-020

- teilbarer Reißverschluss am Beinschritt•Sicherung am Beinreißverschluss erschwert die Selbstentkleidung und den Zugriff auf Windel-/ Inkontinenzmaterial
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit
- diagonal verlaufender Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor
- figurnaher Schnitt
- Farben: marine erika petrol
- Größen S - XL

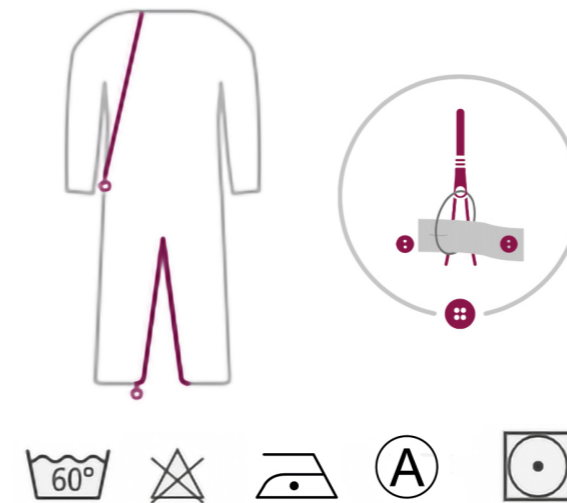

Pflegeoverall CareFunction deckt einen Großteil der Anforderungen an einen modernen Pflegeoverall ab. Ein praktischer, diagonal verlaufender Reißverschluss am Rücken beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor und sorgt dafür, dass der Overall nicht über den Kopf ausgezogen werden muss. Das vereinfacht zum einen das An- und Auskleiden durch Pflegenden, zum anderen verhindert es das Selbsteinkleiden des Patienten. Der Bein-Reißverschluss mit optionalem Sicherheitsknopf erleichtert das Wechseln des Inkontinenz-Materials immens, und erschwert dem Patienten zusätzlich das eigenständige Entkleiden. Das weiche und hautfreundliche Material sorgt für höchsten Tragekomfort. Den Pflegeoverall mit langen Armen und Beinen gibt es in drei kräftigen Farben. Der figurbetonte Overall ist gleichermaßen für Männer und Frauen geeignet.



CareActive Pflegeoverall Jeans

- Art.Nr.: 4510-017
- Optik von Alltagskleidung
- volle Pflegefunktion durch Rückenreißverschluss
- keine Möglichkeit zur Selbstentkleidung und somit kein Zugriff auf Windel Inkontinenzmaterial
- Shirt und Hose sind fest miteinander verbunden
- der Stoff ist vorgewaschen und färbt nicht ab
- echte Taschen vorn
- angedeutete Gesäßtaschen
- Hosenbeine können gekrempelt oder gekürzt werden



Hüftprotektoren

Mit dem Suprima 1490 001 Hüftprotector-Slip beugen Sie effektiv Oberschenkelhalsbrüchen und Verletzungen im Falle eines Sturzes vor. Rechts und links verfügt der Slip über Protektorentaschen, die sich ideal für die exakte Positionierung der Hüftprotektoren eignen. Diese lassen sich passgenau in den Slip einsetzen und tragen nicht auf. Der Hüftprotector-Slip ist aus einem Stück nahtlos rundgestrickt und dadurch äußerst langlebig. Durch den breiten Komfortbund ist der Slip angenehm zu tragen, und bietet durch die gleichmäßige Kompression ein hohes Sicherheitsgefühl. Funktionell und bequem - die spezielle Unterwäsche bietet dem Tragenden sowohl bei Aktivität als auch beim Liegen höchsten Schutz. Der Slip ist gleichermaßen für Damen und Herren geeignet und aufgrund seiner Elastizität auch für XXXL-Patienten einsetzbar.

Wirkungsvoller Schutz für den Oberschenkelhals

- nach CE / DIN / EN 1621-1 zertifiziert
- ergonomisch geformt
- hoher Tragekomfort auch im Liegen
- flache Protektoren tragen nicht auf
- viel Bewegungsfreiheit ohne Druck- und Scheuerstellen

Material:


- viscoelastischer Weich-Schaum
- weiterentwickelte Safety Comfort Protektoren
- wirkungsvoller Schutz für den Oberschenkelhals durch
- Schlagdämpfung weit über die geforderte Norm hinaus

Eigenschaften

- Tragekomfort und Körperschutzfunktion durch ergonomische Formgebung vereint
- durch geringes Gesamtgewicht kaum zu spüren
- Tag und Nacht zu tragen

Schlagdämpfung

- intelligentes Dämpfungssystem reagiert auf unterschiedliche Belastungen
- Wiederverwendbarkeit nach Stürzen: Protaktor kehrt nach Aufhebung der Belastung in seinen Ausgangszustand zurück

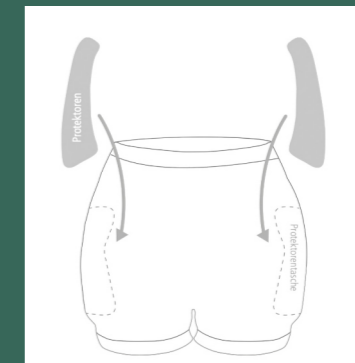



INAMA

www.inama.bz.it
www.inamasanis.com